

bitte BP in Blau umfärben und auf Format

8 x 6 cm verkleinern

SERVOCURA®

Tragegurt für Urin-Beinbeutel

servona
Medizintechnik plus!

SERVOCURA® leg bag straps

Inhalt / Contents

1 Paar / 1 pair

Farbe / Colour

weiß / white

Material / Material

Thermoplastische Elastomer, Silikon / thermoplastic rubber, silicone

Länge / Length

- 54 cm für einen Beinumfang von 50 cm

- 54 cm for a leg circumference of 50 cm

Zweckbestimmung / Intended purpose

- Zur Befestigung von Urin-Beinbeuteln am Ober- oder Unterschenkel

- For attaching urine leg bags to the upper or lower leg

Medizinprodukt | medical device
Einpatientenprodukt | single patient product



Abbildung kann vom Originalprodukt abweichen

REF 25226



LOT XXXXXXXX



PZN 09095918

yyyymm

UDI



(xx)xxxxxxxxxxxxxx
(xx)xxxxxx
(xx)xxxxxx






Servona GmbH
Biberweg 24-26
53842 Troisdorf | Germany

Tel. +49 (0)2241 9322-0
Fax +49 (0)2241 9322-277
info@servona.de | www.servona.de

SERVOCURA®

Tragegurt für Urin-Beinbeutel

servona
Medizintechnik plus!

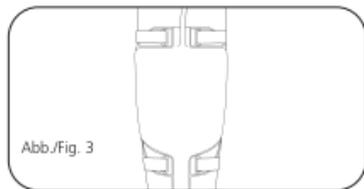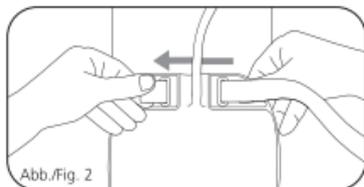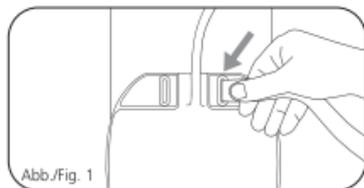

Beschreibung:

Mit SERVOCURA® Tragegurten können Urin-Beinbeutel mit Halteösen am Ober- oder Unterschenkel befestigt werden. Die Gurte werden mit einem Klettverschluss geschlossen, die gummierte Rückseite sorgt für Halt auf der Haut.

Warnung: Die Gurte nicht zu fest am Bein anziehen. Thrombosegefahr!

Anwendung:

Abb. 1: Den Tragegurt mit der gummierten Seite zum Bein von der Vorderseite durch die rechte obere vorgestanzte Halteöse des Urinbeutels stecken.

Abb. 2: Das Gurtende durch die linke obere Halteöse am Urinbeutel herausziehen, beide Gurtenden um das Bein herumführen und mit dem Klettverschluss schließen.

Abb. 3: Den zweiten Gurt entsprechend durch die beiden unteren vorgestanzten Halteösen des Urinbeutels ziehen und den Gurt schließen.



Hinweis: Zum Waschen Klettverschlüsse schließen. Vor Gebrauch vollständig trocknen lassen. Tragegurte über den Restmüll entsorgen, wenn sie beschädigt oder verfärbt sind, spätestens jedoch nach 14 Tagen.

Description:

With SERVOCURA® leg bag straps, urine leg bags with eyelets can be attached to the upper or lower leg. The straps are fixed with a Velcro fastener, the rubberized backside provides support on the skin.

Warning: Do not tighten the straps too tight on the leg. Risk of thrombosis!

Instructions for use:

Fig. 1: Insert the strap with the rubberized backside to the leg from the front through the upper right pre-cut eyelet of the urine bag.

Fig. 2: Pull the strap end out through the upper left pre-cut eyelet, pass both strap ends around the leg and close with the Velcro fastener.

Fig. 3: Pull the second strap according to the first strap through the two lower pre-cut eyelets of the urine bag and close the strap.



Note: Close the Velcro fasteners for washing. Let dry completely before use. Dispose of the straps in domestic waste, if they are damaged or discolored, at the latest after 14 days.



Servona GmbH
Biberweg 24-26
53842 Troisdorf | Germany

Tel. +49 (0)2241 9322-0
Fax +49 (0)2241 9322-277
info@servona.de | www.servona.de